HYCOOX海库斯 Multi Suction Injector

Innovative multifunctional crystal Injector Device









扫一扫上面的二维码图案,加我为朋友。

海库斯水光机


二类医疗器械备案



HYCOOX 海库斯 是一款具有中国二 类医疗器械备案认证的创新型、多功 能注射医疗设备。

采用精准控制系统,安全性能高,

精准利用负压和非负压方式,最低减少顾客痛感,将药物精准送达真皮层。

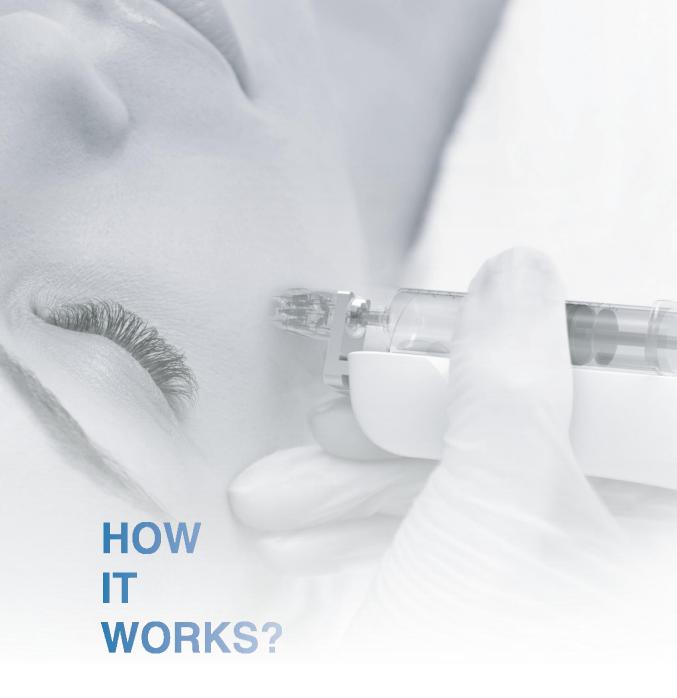

HYCOOX (海库斯) 水光仪器有两种不同的模式:

自动感应模式和非负压模式。自动感应模式使用9针和可调节9针,利用安全真空技术,最大限度地减少漏液及减少针头插入痛感。 非负压模式使用单针、3针和5针均可准确注射药物。



Hycoox 海库斯 ^{备案资质}





Hycoox 海库斯 水光机

注册证编号: 苏械注准20232140740

名称	海库斯水光机	
产品名称	电子注射器助推控制装置	
型号规格	NBI-200	
结构及组成	产品由主机、注射手柄、脚踏开关、电源适配器、电源线、机架和电子注射器控制软件 (发布版本号V1)组成	
适用范围	与一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌 注射针配合使用,用于对患者面部真皮层注 射透明质酸钠。在医疗机构中使用,不与身 体或药物直接接触。	

海库斯



■规格

型号	NBI-200
触电防护类型	II 类ME设备/B型应用部件
医疗器械分类	二类医疗器械
功率	适配器:输入:交流100- 240v, 50/ 60hz 1.2 A输出:直流24v, 1.7 A
重量	净重: 15kg
规格	374mm x 300mm x 160mm (宽 x 长 x 高)

NORA Medical Technology

N1

自动感应 自动感应皮肤, 确保安全和精确 地注入药物

系统特点

海库斯多功能负压注射器是一款具 有高端品质的创新医疗器械。它提 高了治疗质量,并提高了患者对安 全系统,减少疼痛,防止漏液的满 意度。

负压 通过真空负 压防止药物回 流,确保每次 注射量一致。

CRYSTAL MULTI-NEEDLE



Crystal 3 Pin Multi Needle



Crystal 5 Pin Multi Needle



Crystal 9 Pin Multi Needle



Crystal 9 Pin Adjustable Multi Needle

防漏调节 通过11年的 专业经验, 最大限度地 减少漏液。

特有水光针设计 针顶部的负压连 接部可防止溶液 吸入针头内部。

04

Hycoox 海库斯 设备功能



先进&精确的仪器设置

将所有设置集中到一个大屏幕内,以提高使用的便利性。



防止倒流设计

防漏、粘度和注射速度的调节设置 防止溶液回流



减少注射痛感和溶液泄漏损失

自动感应模式与水晶多针头的配合, 最大限度地减少注射疼痛和溶液损 失。



精准注射, 快速治疗

定制治疗方案,精准注射深度和精确的药量。





非负压型(备案中)

水晶多针头-5针



适用范围

皮肤/头皮

匹配/兼容 Hycoox海库斯 MESO水光枪 手动手打

针类

固定

		长度 (mm)			
1.2	1.5	2.0	3.0	4.5	
GAUGE					
34G		32G		31G	

^{*}We customize the special needles based on the client's needs.

水晶多针头-3针(显微)



适用范围

皮肤

匹配/兼容

Hycoox海库斯 MESO水光枪 水晶皮肤护理仪

针类

固定

	长度 (mm)	
0.8 1.5		2.5
	GAUGE	
	32G	

^{*}We customize the special needles based on the client's needs.

负压型针头(餐案件)

水晶多针头-9针



适用范围

皮肤

匹配/兼容

Hycoox 海库斯 MESO 水光枪

针类

固定

长度(mm)			
0.8	1.0	1.2	1.5
GAUGE			
34G	3	32G 3	

^{*}We customize the special needles based on the client's needs.

水晶多针头-9针(旋转可调节)



适用范围

皮肤

匹配/兼容

Hycoox 海库斯

针类

可调节

长度 (mm)		
可调节范围为 0~3mm		
GAUGE		
34G	32G	31G

*We customize the special needles based on the client's needs.



水光仪器皮肤治疗对比

with Hycoox(海库斯)

有效性和建议周期



治疗时间 20-30分钟 多针头-9针



修整时间 24小时内



麻醉时间 30分钟



周期 前3疗程:1-2个月/次 第3疗程后:6个月以后

建议设置

模式	自动注射
注射器大小	3.0 ml
溶液	3cc
注射数	100 发
皮肤类型	普通
速度	2-3
防漏	4
注射间隔	6-7
注射针	水晶多针-9针32G 1.0-1.2mm / 34G 1.0mm
	N 10 1 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 1

^{*}此设置可以根据客户的皮肤状况进行更改

推荐客户



减少疼捅 皮肤嫩肤效果+专利水晶针头




准确及最佳效果 敏感肌肤全脸抗衰老

8 NOBA Medical Technology

减少黑斑



皮肤再生

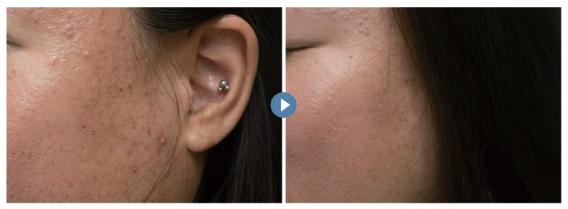

Before 1个疗程后(**72**小时后)

祛痘祛斑



Before 2个疗程后(48小时后)







扫一扫上面的二维码图案,加我为朋友。